

UPUTE ZA UPORABU:

- Ostvarite perkutani pristup iglom od 21 GA. **UPOZORENJE:** Postavite prst u sterilnoj rukavici preko spojnika igle kako biste gubitak krvi i rizik od aspiracije zraka sveli na najmanju moguću mjeru. Rizik od zračne embolije smanjit će se ako ovaj dio postupka izvedete dok pacijent izvodi Valsavin manevar.
- Uvedite žicu vodilicu promjera 0,018" kroz iglu od 21 GA. **OPREZ:** Žica vodilica ne smije se izvlačiti kroz iglu od 21 GA. Može doći do oštećenja ili presijecanja žice vodilice. Ako se vrh žice vodilice mora izvući kroz uvedenu iglu, uklonite iglu i žicu kao cjelinu.
- Izvučite iglu od 21 GA.
- Uvedite uvodnik Micro-Stick® preko žice vodilice od 0,018".
- Uklonite dilatator i žicu vodilicu od 0,018", a ovojnicu ostavite u žilnom sustavu bez pomicanja. **UPOZORENJE:** Postavite prst u sterilnoj rukavici preko otvora ovojnice kako biste gubitak krvi i rizik od aspiracije zraka sveli na najmanju moguću mjeru. Rizik od zračne embolije smanjit će se ako ovaj dio postupka izvedete dok pacijent izvodi Valsavin manevar.
- Kroz ovojnicu uvedite žicu vodilicu ili kateter promjera do 0,038".
- Uklonite ovojnicu bez pomicanja žice vodilice ili katetera u žilnom sustavu.
- Pregledajte uređaj nakon što ga uklonite iz pacijenta kako biste osigurali da u pacijentu ne ostane stranih tijela.

Oprez: Ako ne možete raskinuti omotač, zaustavite postupak.

Medcomp® ne preporučuje nikakvu određenu tehniku za upotrebu ovog uređaja. Liječnik bi trebao ocijeniti prikladnost uređaja u skladu sa stanjem pojedinog bolesnika i svog liječničkog iskustva.













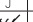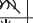


JAMSTVO

Medcomp® JAMČI DA JE OVAJ PROIZVOD PROIZVEDEN U SKLADU S VAŽEĆIM NORMAMA I SPECIFIKACIJAMA. PACIJENTOVO STANJE, KLINIČKO LIJEČENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA MOGU UTJECATI NA UČINKOVITOST OVOG PROIZVODA. OVAJ JE PROIZVOD POTREBNO UPOTREBLJAVATI U SKLADU S NAVEDENIM UPUTAMA I PREMA UPUTAMA LIJEČNIKA KOJI PROPISUJE TERAPIJU.

Zbog trajnog usavršavanja proizvoda, cijene, specifikacije i dostupnost modela podložni su promjenama bez prethodne najave. Medcomp® zadržava pravo izmjene svojih proizvoda ili sadržaja bez prethodne najave.

Medcomp® i Micro-Stick® registrirani su zaštitni znakovi društva Medical Components, Inc.

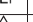SYMBOL TABLE

5.1.1		Manufacturer *
5.1.4		Keep Dry *
5.1.5		Non-pyrogenic *
5.1.2		Keep Away from Sunlight *
5.1.3		Sterilized Using Ethylene Oxide *
5.2.2		Do Not Use if Package is Damaged *
5.1.4		Use-by Date *
5.2.4		Do Not Resterilize *
5.1.5		Batch/Lot Number *
5.1.6		Catalogue Number *
5.4.4		Caution, consult Accompanying Documents *
5.4.2		Do Not Re-use *
5.1.2		Authorized Representative in the European Community
		Prescription Use Only ***
5.1.7		Upper and Lower Temperature Limits *

***This symbol is in accordance with ISO 15223-1.**

***** FDA guidance Use of Symbols in Labeling.**

Note: Temperature symbols: "This symbol only applies to kits with drugs."

EC REP

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Germany

 **Medical Components, Inc.**
1499 Delp Drive
Harleysville, PA 19438 U.S.A.
Tel:215-256-4201
Fax:215-256-1787
www.medcompnet.com

CE
2797